

Instrucciones de uso

Histolog[®] Scanner

**Aplicación de
software
versiones 3.4.x**






SamanTree Medical SA
Avenue de Provence 12
1007 Lausana
Suiza
Tel.: +41 21 625 0940

Atención al cliente:
Tel.: +41 21 623 0073
contact@samantree.com



SamanTree Medical France SASU
c/o A.A.C.I.
2 avenue des Allobroges
74200 Thonon-les-Bains
Francia

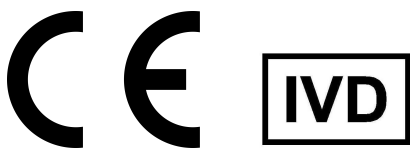

Persona responsable en el RU

UKMDR Ltd.
71-75 Shelton Street, Covent Garden
Londres WC2H 9JQ
Reino Unido



Copyright © 2015-2026

Esta publicación está protegida por derechos de autor y todos los derechos están reservados. Ninguna parte de este documento puede reproducirse ni transmitirse de ninguna manera ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas fotocopias y grabaciones, para fines que no sean el uso personal del comprador, sin permiso de SamanTree Medical.

Histolog es una marca registrada de SamanTree Medical. Todos los demás nombres comerciales y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

El Histolog[®] Scanner y el Histolog[®] Dish son productos protegidos por patentes.

Consulte www.samantree.com/ip para obtener más información sobre la propiedad intelectual.

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción de los cambios
1.0	14-09-2022	Primera versión de un documento dedicado a las instrucciones de uso de la aplicación de software del Histolog® Scanner. Las instrucciones corresponden a la versión 3.2.0 de la aplicación de software del Histolog® Scanner.
1.1	19-12-2022	La versión presenta pequeñas mejoras del texto de la versión anterior a fin de preparar el texto para su traducción en otros idiomas de cara a las siguientes actualizaciones de la aplicación de software 3.2.x del Histolog® Scanner.
1.2	24-03-2023	La versión redefinió los conceptos de “Anotación de líneas”, “Brillo y contraste”, “Monitorización del espacio de almacenamiento”, “Navegador” y “Herramienta de coloración de mapas” con sus nuevas denominaciones de “Anotación con regla”, “Contraste”, “Indicador del espacio de almacenamiento”, “Mapa” y “Herramienta de modo de color” respectivamente. También introduce pequeñas mejoras del texto y corrige la numeración equivocada de apartados de la versión anterior.
1.3	15-03-2024	La versión se actualizó para adaptarla a la versión 3.3.x de la aplicación de software del Histolog® Scanner. La actualización introdujo perfiles de aplicación, rastros de navegación y licencias de software.
1.4	25-10-2024	La versión se actualizó para adaptarla a la versión 3.4.x de la aplicación de software del Histolog® Scanner. La actualización introdujo la colaboración remota, la elección del idioma de la interfaz de usuario, la gestión ‘admin’ de los usuarios (incluida la nueva funcionalidad de derechos de acceso de los usuarios), de los usuarios remotos, del servidor proxy y del contenido de la galería. Se ha eliminado la posibilidad de acceder a la aplicación de software del Histolog® Scanner en un modo no autenticado. La actualización también introdujo nuevos metadatos para el perfil de aplicación Prostate (Próstata).
1.5	27-01-2025	La versión se actualizó para adaptarla a la versión 3.4.1 de la aplicación de software del Histolog® Scanner. Se añadieron unidades compartidas conectadas a la red a posibles destinos de exportación. Se ha añadido una sección para la gestión de exportaciones de red desde la cuenta ‘admin’. El servidor de SamanTree Medical se añadió como posible destino para la exportación de archivos de registro. Se añadieron requisitos para el ordenador de un usuario remoto. Se introdujo la prueba de conexión al servidor proxy desde el cuadro de diálogo de servicio del Histolog® Scanner.
1.6	04-11-2025	La versión se actualizó para incluir el escenario de conectividad de red local para la colaboración remota. Se eliminaron las licencias de software.
1.7	13-03-2026	La versión se actualizó para eliminar la marca de orientación de las interfaces del Histolog® Scanner, de acuerdo con la versión 3.4.3 de la aplicación de software. En la sección 5.4, los números de subsecciones a partir de 5.4.10 se actualizaron en consecuencia.

1. Índice

Historial de revisiones	3
1. Índice	3
2. Explicación de los símbolos	6
3. Introducción	7
4. Descripción general del dispositivo	8
4.1. Descripción general	8
5. Uso del Histolog [®] Scanner	9
5.1. Antes del uso	9
5.1.1. Encendido	9
5.2. Después del uso	9
5.2.1. Apagado	9
5.3. Aplicación de software del Histolog [®] Scanner	10
5.3.1. Gestión de usuarios: Modo Autenticación del usuario	10
5.3.2. Acceso de los usuarios: Modo Autenticación del usuario	10
5.3.3. Operaciones del usuario: Perfiles de aplicación, galería, modo directo, examinador de imágenes	11
5.3.4. Panel de control de la adquisición	12
5.3.5. Pantalla Galería: Gestión de las sesiones y controles de datos contextuales.	14
5.3.5.1. Exploración de imágenes y sesiones en la Galería (panel izquierdo)	15
5.3.5.2. Funcionalidades de servicio	17
5.3.5.3. Datos contextuales de la sesión	18
5.3.5.4. Contenido de la Galería: Vista de una sola sesión	23
5.3.5.5. Contenido de la Galería: Vista de todas las sesiones	26
5.3.6. Pantalla Examinador de imágenes	27
5.3.6.1. Panel de datos contextuales de la imagen	27
5.3.6.2. Área de la imagen con mapa	29
5.3.6.3. Barra de herramientas de la imagen	30
5.3.7. Pantalla Modo en vivo	32
5.3.7.1. Posicionamiento de la muestra	32
5.3.7.2. Estabilización de la muestra	32
5.3.7.3. Barra de herramientas del modo en vivo	33
5.3.7.4. Panel de datos contextuales de la sesión	34
5.4. Uso de la aplicación de software del Histolog [®] Scanner	35
5.4.1. Iniciar sesión en la aplicación de software del Histolog [®]	

- 5.4.10. Cambiar el modo de color de la imagen en la pantalla Examinador de imágenes 40
- 5.4.11. Guardar una instantánea de la imagen mostrada 40
- 5.4.12. Ajustar el contraste de la imagen 41
- 5.4.13. Añadir una descripción de la imagen 41
- 5.4.14. Especificar la Superficie de la muestra para una imagen 41
- 5.4.15. Trabajar con anotaciones sobre una imagen 41
 - 5.4.15.1. Trabajar con anotaciones con forma libre 41
 - 5.4.15.2. Trabajar con anotaciones con regla 42
 - 5.4.15.3. Trabajar con anotaciones con chincheta 42
- 5.4.16. Exportar contenido de la Galería a un dispositivo de almacenamiento externo 43
- 5.4.17. Eliminar contenido de la Galería 44
- 5.4.18. Restaurar contenido eliminado de la Galería 44
- 5.4.19. Eliminar permanentemente contenido de la Galería 44
- 6. Colaboración remota 46**
 - 6.1. Acerca de la colaboración remota 46
 - 6.2. Habilitar/deshabilitar conexiones remotas 46
 - 6.3. Establecer la conexión e iniciar la colaboración remota 47
 - 6.3.1. Usuario remoto: instale y configure el paquete de usuario remoto 47
 - 6.3.2. Usuario remoto: conectar al dispositivo Histolog[®] Scanner 47
 - 6.3.3. Operador: aprobar la conexión entrante de un usuario remoto 48
 - 6.3.4. Anonimización de los datos de los pacientes y del operador durante la colaboración remota 48
 - 6.3.5. Personalizar la disposición del teclado 49
 - 6.3.6. Navegación de un usuario remoto durante la colaboración remota 49
 - 6.4. Cerrar colaboración remota 49
- 7. Administración de la aplicación de software del Histolog[®] Scanner 49**
 - 7.1. Gestionar cuentas de usuario 50
 - 7.1.1. Acciones de cuentas de usuario 50
 - 7.1.2. Lista de usuarios 52
 - 7.2. Gestionar colaboración remota 52
 - 7.2.1. Configurar el servidor proxy 53
 - 7.2.2. Configurar usuarios remotos 54
 - 7.3. Gestionar galería 55
 - 7.4. Gestionar exportaciones de red 55
 - 7.4.1. Gestionar unidades compartidas conectadas 55
- 8. Mantenimiento 58**
 - 8.1. Actualización de la aplicación de software del Histolog[®] Scanner 58
- 9. Solución de problemas 59**

2. Explicación de los símbolos

CE	Marcado CE de conformidad con el reglamento (UE) 2017/746
NOTA	La señal de NOTA en este manual llama la atención sobre información útil acerca de una función o procedimiento.

3. Introducción

Este manual describe la interfaz gráfica de usuario de la aplicación de software del Histolog[®] Scanner de SamanTree Medical para permitir a los usuarios manejar el dispositivo.


Este manual es aplicable a la aplicación de software del Histolog[®] Scanner versión 3.4.3 y versiones posteriores (denominadas 3.4.x) hasta nuevo aviso.

La aplicación de software del Histolog[®] Scanner está diseñada y producida como un componente del producto sanitario para *diagnóstico in vitro* Histolog[®] Scanner. Los usuarios previstos de la aplicación de software son profesionales sanitarios con la debida formación.

Consulte en las instrucciones de uso del Histolog[®] Scanner las instrucciones de configuración, uso y mantenimiento del hardware del dispositivo Histolog[®] Scanner de SamanTree Medical.

4. Descripción general del dispositivo

4.1. Descripción general

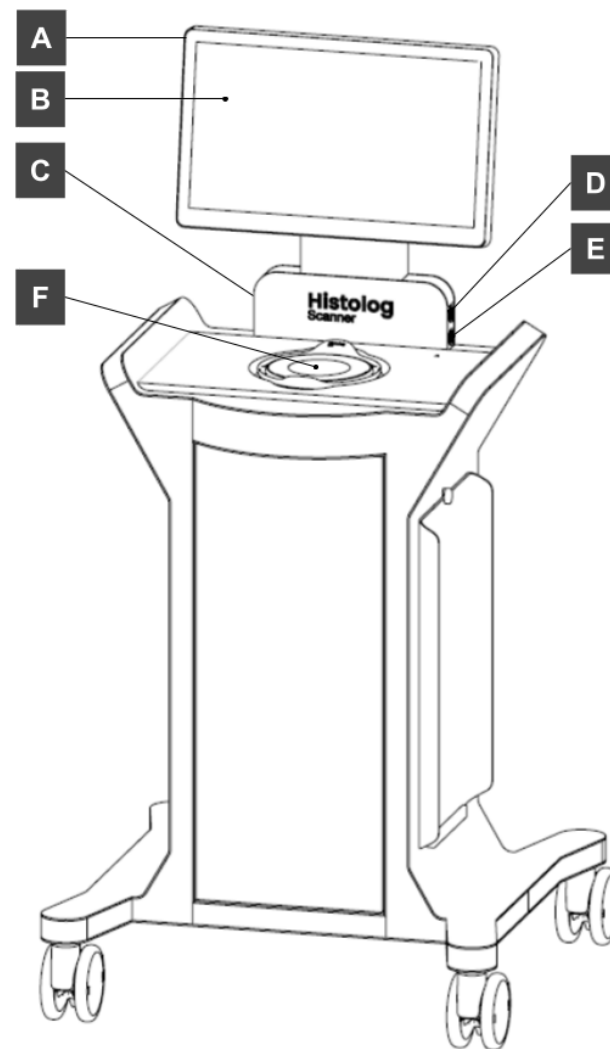

El dispositivo Histolog[®] Scanner consta de los siguientes componentes relacionados con la aplicación de software del Histolog[®] Scanner:

- [A] Monitor de pantalla táctil
- [B] Aplicación de software del Histolog[®] Scanner presentada a los usuarios
- [C] Interruptor de alimentación de encendido/apagado
- [D] Puerto USB
- [E] Puerto Ethernet
- [F] Ventana de imágenes

5. Uso del Histolog[®] Scanner

5.1. Antes del uso


5.1.1. Encendido

1. Encienda el interruptor de alimentación [C] y espere a que la aplicación de software del Histolog[®] Scanner se inicialice.

NOTA Cuando está encendido, el interruptor de alimentación [C] está presionado e iluminado en blanco.

5.2. Después del uso

5.2.1. Apagado

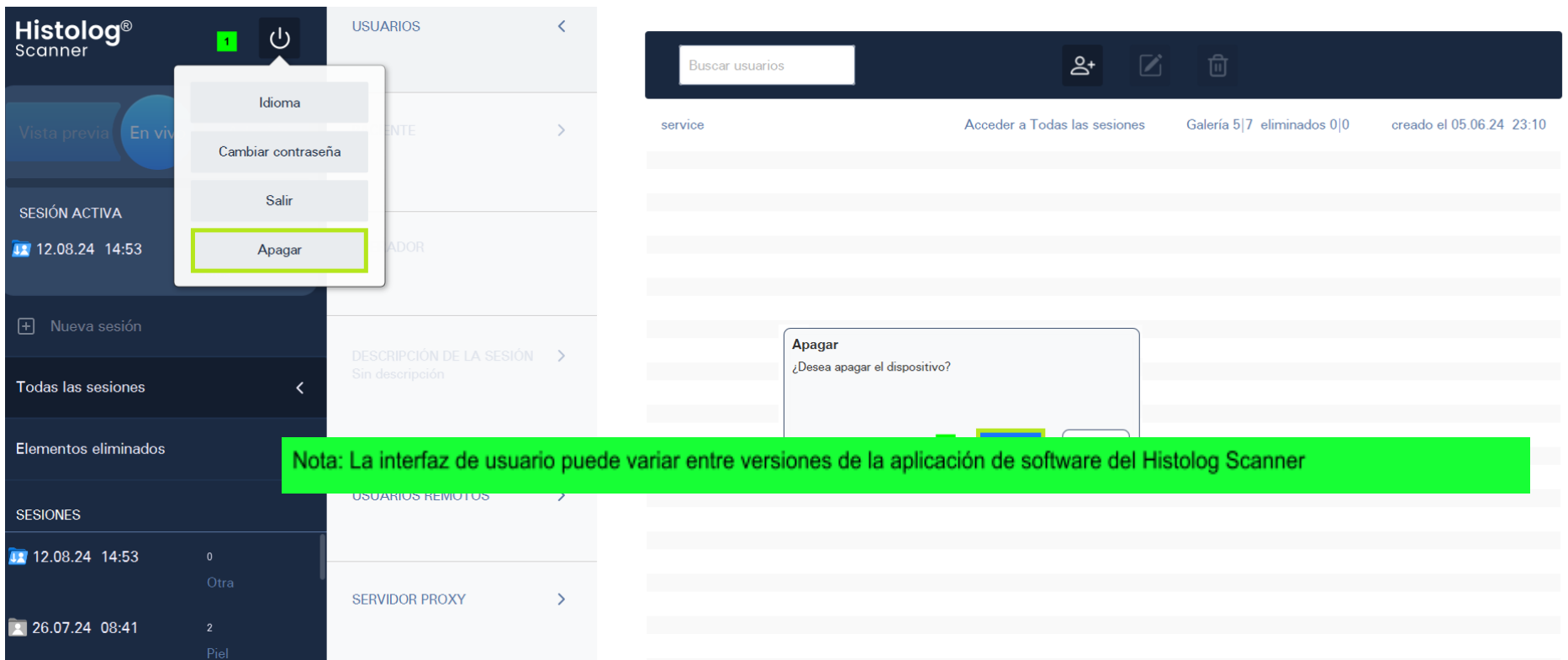

Salga de la aplicación de software del Histolog[®] Scanner:

1. Toque el botón . A continuación, seleccione la opción “Apagar” en el control gráfico emergente.
2. Confirme la acción tocando “Apagar” para apagar el dispositivo.

O toque “Cancelar” si no quiere apagar el Histolog[®] Scanner.

Apague el dispositivo Histolog[®] Scanner:

3. Espere 15 segundos o hasta que el mensaje “Sin señal” aparezca en el monitor, y luego apague el interruptor de alimentación [C].

5.3. Aplicación de software del Histolog[®] Scanner

5.3.1. Gestión de usuarios: Modo Autenticación del usuario

El administrador técnico usa una cuenta especial 'admin' para gestionar las cuentas de todos los demás usuarios. El administrador técnico puede realizar las siguientes operaciones:

- Iniciar sesión en la aplicación de software del Histolog[®] Scanner como usuario 'admin'.
- Gestionar cuentas de usuario: crear nuevas cuentas de usuario, editarlas o eliminarlas, cambiar sus contraseñas, cambiar sus derechos de acceso para acceder a sesiones propias y de otros usuarios.
- Gestionar sesiones e imágenes: ver, eliminar con posibilidad de restaurar y eliminar de forma permanente las imágenes que están en el dispositivo.
- Eliminar una cuenta de usuario existente.
- Cambiar la contraseña propia.
- Salir de la aplicación de software del Histolog[®] Scanner.

Iniciar sesión como usuario 'admin'. Usando la contraseña proporcionada inicialmente por SamanTree Medical, inicie sesión en el Histolog[®] Scanner como usuario 'admin'. Cambie la contraseña inicial mediante la opción "Cambiar contraseña" en el control gráfico emergente bajo el botón .

Crear una nueva cuenta de usuario. Toque el botón  para crear una nueva cuenta de usuario.

Editar una cuenta de usuario existente. Seleccione una cuenta de usuario de la lista de cuentas de usuario existentes. Toque el botón  para editar la cuenta de usuario. Cambie el nombre y los apellidos, la Password (Contraseña) y la configuración de los Derechos de acceso.

NOTA El Nombre de usuario no se puede editar, ya que se puede asociar a sesiones ya exportadas o eliminadas.

Gestionar sesiones e imágenes. La funcionalidad es la misma que la que tienen los usuarios normales del dispositivo. Consulte en el apartado [5.3.5](#) las instrucciones para realizar este paso.

Eliminar una cuenta de usuario existente. Seleccione una cuenta de usuario a eliminar de la lista de cuentas de usuario existentes. Toque el botón  para eliminar la cuenta de usuario.

Iniciar sesión como usuario normal. Usando la contraseña proporcionada inicialmente por su administrador técnico, inicie sesión en el Histolog[®] Scanner con su nombre de usuario.

Cambiar contraseña. Tras iniciar sesión, cambie la contraseña inicial mediante la opción “Cambiar contraseña” en el control gráfico emergente bajo el botón .

Cambiar el idioma. Cambie el idioma de la aplicación de software del Histolog[®] Scanner antes o después del inicio de sesión. Se puede acceder a la función mediante el control gráfico emergente disponible con el botón .

Salir. Para salir del dispositivo Histolog[®] Scanner, use la opción “Salir” en el control gráfico emergente disponible bajo el botón .

5.3.3. Operaciones del usuario: Perfiles de aplicación, galería, modo directo, examinador de imágenes

A través de la aplicación de software del Histolog[®] Scanner, el usuario maneja el dispositivo Histolog[®] Scanner y trabaja con las imágenes digitales generadas mediante el dispositivo. El trabajo con imágenes digitales se organiza en sesiones, y cada sesión incluye un conjunto de imágenes. Este conjunto de imágenes debe pertenecer a un solo paciente o a una sola muestra. Cada sesión pertenece a un perfil de aplicación concreto que indica el tipo de tejido de la muestra captada.

Tres perfiles de aplicación compatibles ofrecen herramientas y flujos de trabajo especializados para la documentación de la muestra de tejido. Estos son perfiles de aplicación Mama, Próstata y Piel.


Otros perfiles de aplicación compatibles utilizan herramientas y flujos de trabajo genéricos para la documentación de la muestra de tejido. Estos son los siguientes perfiles de aplicación: Vejiga, Cerebro, Cuello uterino, Colon, Intestino, Mandíbula, Riñón, Hígado, Pulmón, Ganglio linfático, Esófago, Ovario, Páncreas, Pene, Estómago, Lengua, Amígdala, Tráquea, Garganta, Tiroides, Uréter, Uretra, Útero, Vagina, Otro.

Para iniciar una nueva sesión, el usuario debe seleccionar un perfil de aplicación para esa sesión utilizando la interfaz gráfica de usuario correspondiente (consulte el apartado [5.4.2](#)).

La aplicación de software del Histolog[®] Scanner se presenta en tres pantallas principales:


- La pantalla

El panel de control de la adquisición **[B1]** (descrito en el apartado [5.3.4](#)) aparece en todos los modos de pantalla mencionados.

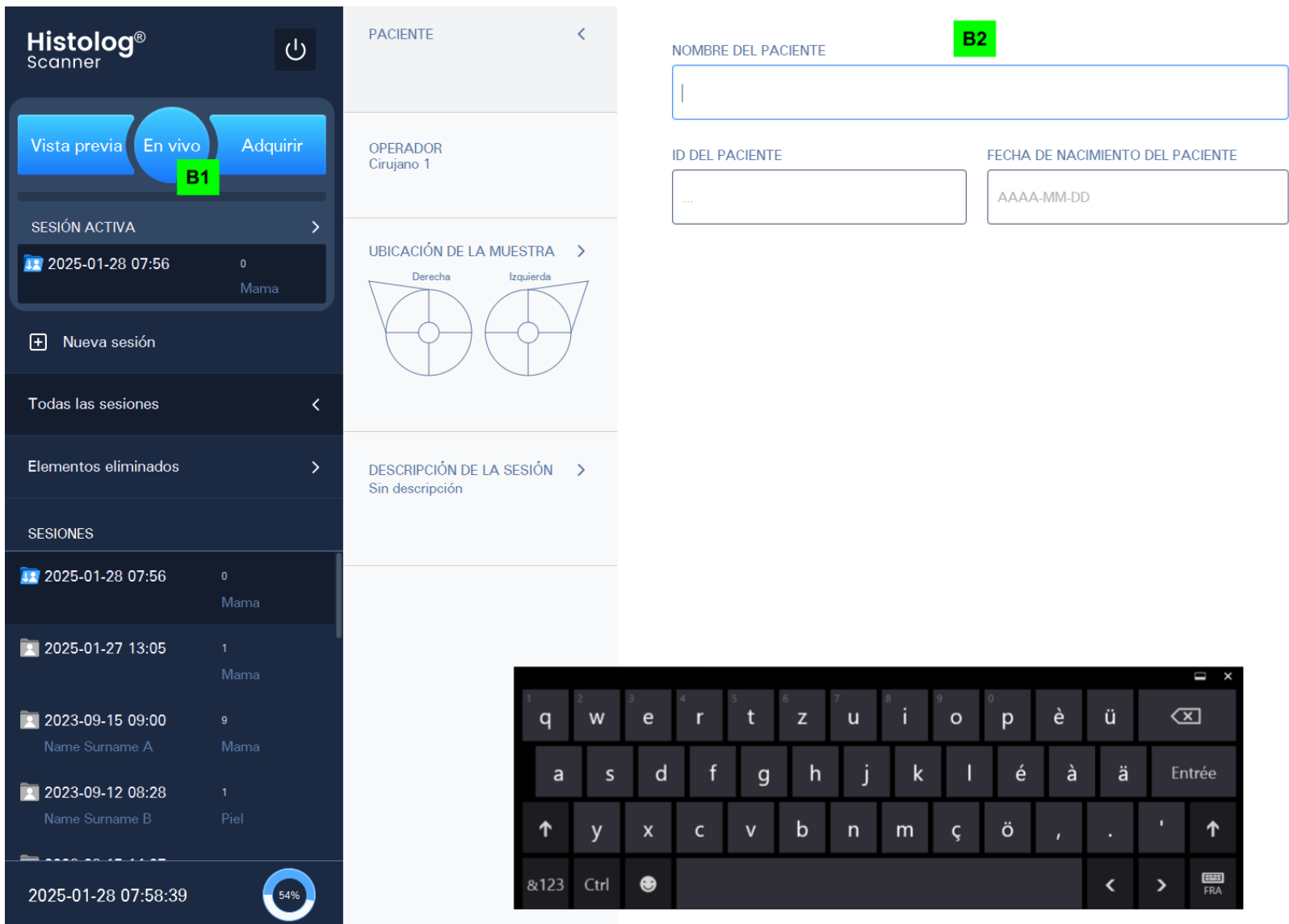


5.3.4. Panel de control de la adquisición

El panel de control de la adquisición **[B1]** está disponible para los usuarios con los tres modos de pantalla. El panel proporciona herramientas para capturar imágenes y para iniciar/finalizar la adquisición de señales dentro del modo en vivo.

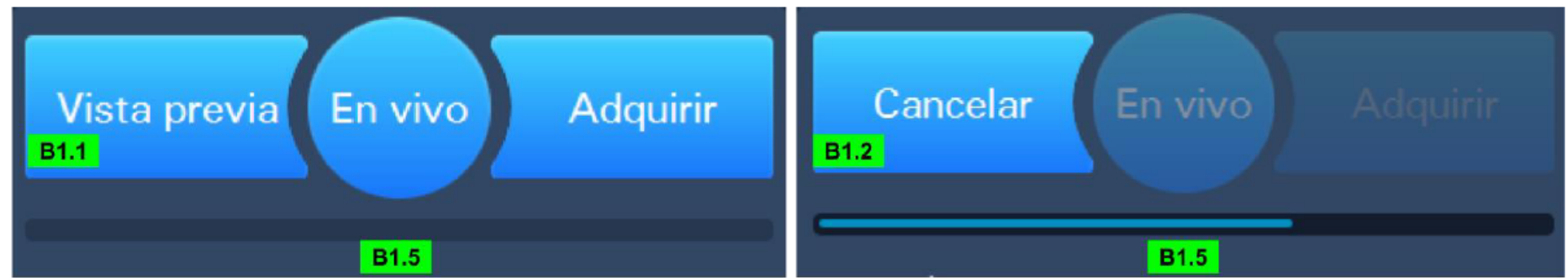


B1.1. El botón **Vista previa** ejecuta la obtención rápida de imágenes de una muestra con una vista previa.

B1.2. El botón **Cancelar** interrumpe un proceso en curso de obtención de imágenes con Vista previa.

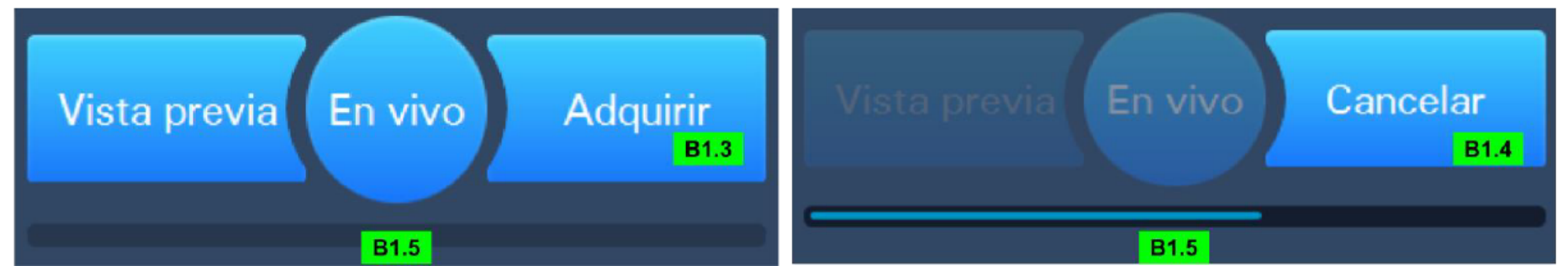

B1.5. El **indicador de progreso** presenta el progreso de la visualización de la imagen durante un proceso de obtención de imágenes con Vista previa o con Adquirir.

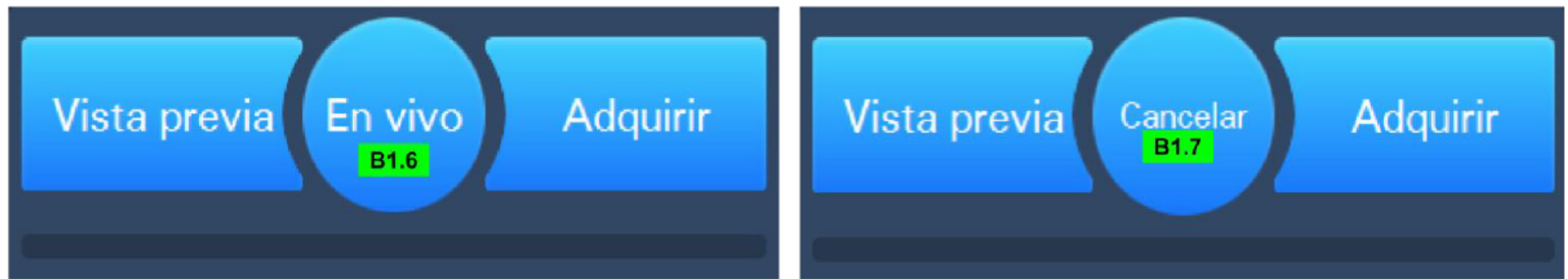


B1.6. El botón **En vivo** inicia la adquisición de una señal en tiempo real, para permitir una evaluación del posicionamiento y la estabilización de la muestra.

B1.7. El botón **Cancelar** interrumpe la visualización de la muestra dentro del modo en vivo.

5.3.5. Pantalla Galería: Gestión de las sesiones y controles de datos contextuales.

La pantalla Galería [B2] incluye herramientas para gestionar las Sesiones (panel izquierdo) y herramientas para controlar los datos contextuales referentes a las sesiones e imágenes (parte central).

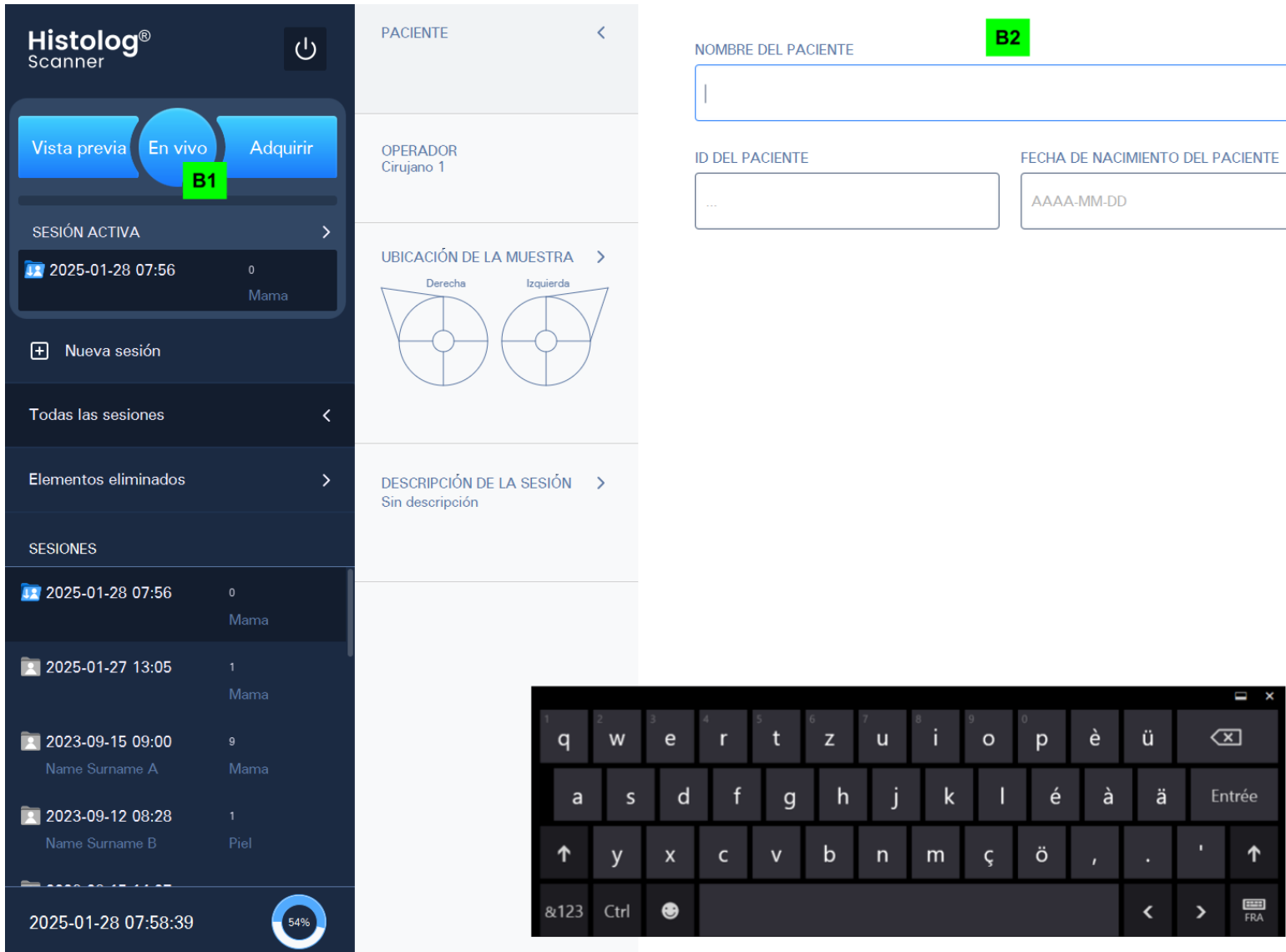

5.3.5.1. Exploración de imágenes y sesiones en la Galería (panel izquierdo)

La pantalla Galería proporciona herramientas para manejar las sesiones y las imágenes. Cuando se inicia el Histolog® Scanner, se crea automáticamente una nueva sesión.


B2.1. El apartado **SESIONES**, situado en el panel izquierdo de la pantalla Galería, presenta la lista de todas las sesiones, ordenadas de arriba a abajo en orden cronológico inverso, de forma que las últimas sesiones aparecen en la parte superior de la lista. Toque una sesión para mostrar sus datos contextuales y su contenido de imágenes en el panel de la Galería.

Las sesiones de la lista se describen con la fecha y hora en que fueron creadas, con el número de imágenes que contienen (mostrado en la parte derecha de la lista), con su perfil de aplicación y, opcionalmente, con el nombre del paciente si está documentado.


B2.2. Sesión activa. La sesión activa está marcada con un icono azul claro y una flecha . La flecha indica la sesión activa donde van a almacenarse las imágenes recién adquiridas. La sesión activa también se muestra debajo del botón “Sesión activa” (B2.7). Las demás sesiones se marcan con iconos grises .

B2.3. Sesiones. Desplácese a través de la lista de sesiones para localizar cualquier sesión que se haya creado con el dispositivo (y que no se haya eliminado).

B2.4. Nueva sesión. El botón crea una nueva sesión en el dispositivo que automáticamente se convierte en la Sesión activa (de forma que todas las imágenes recién producidas con Vista previa y con Adquirir)quedan registradas en esta nueva sesión).

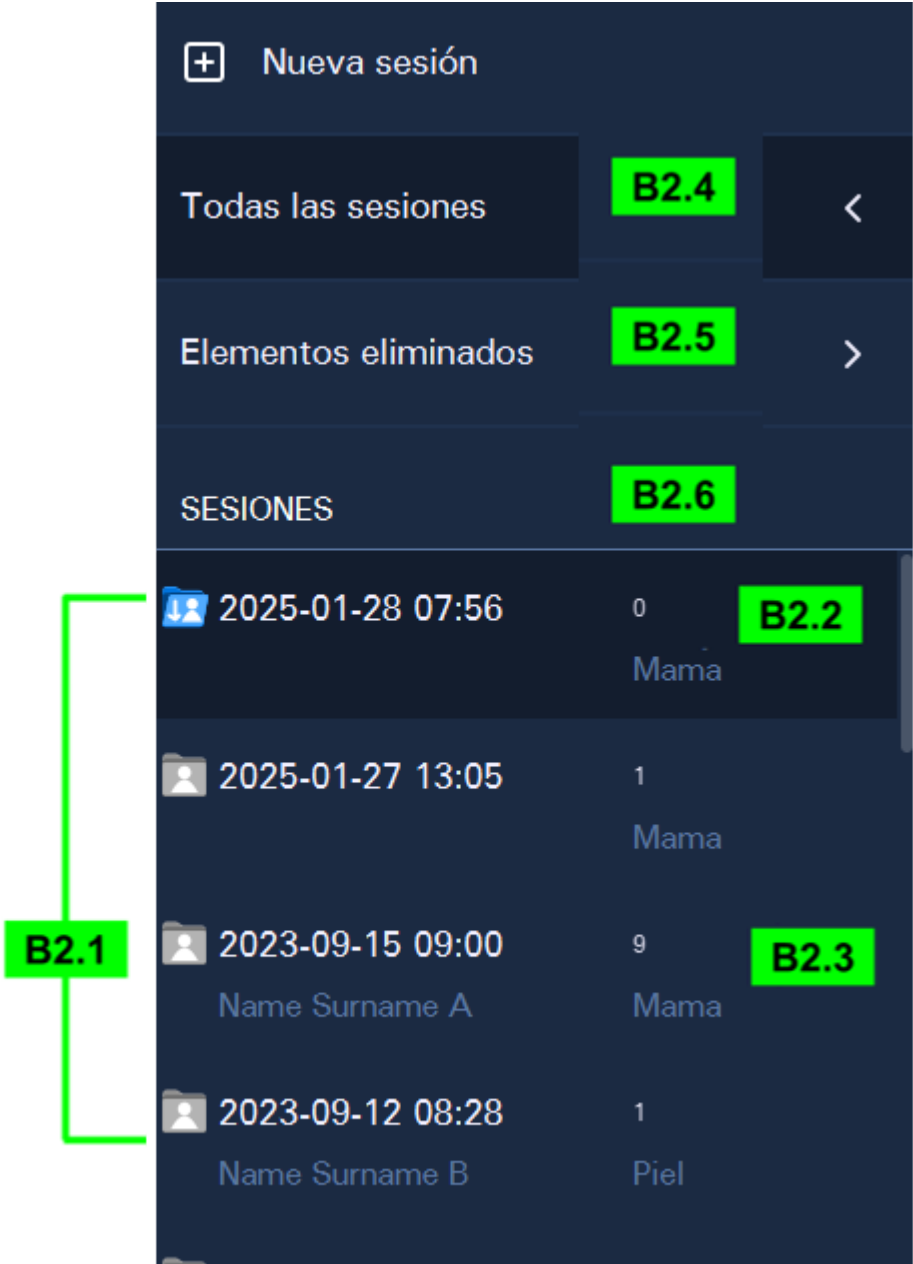

5.3.5.2. Funcionalidades de servicio

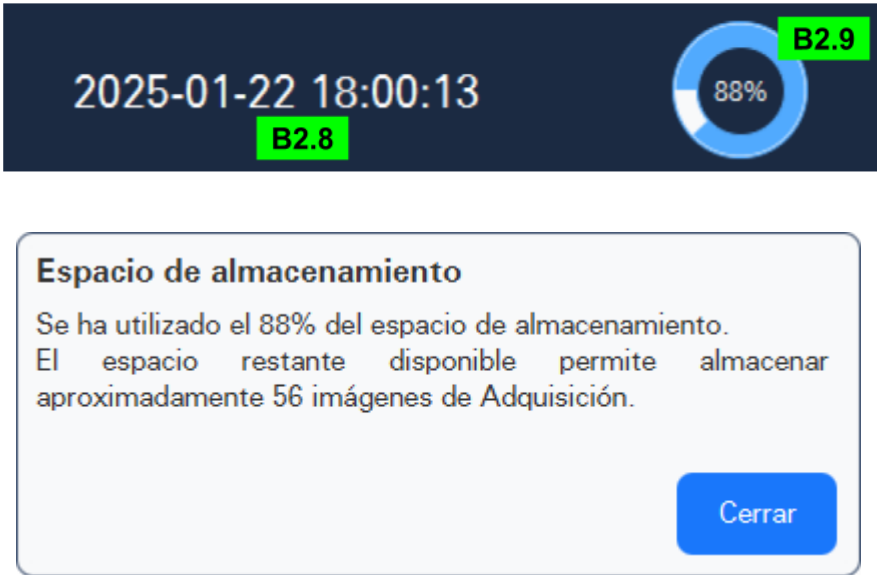

B2.8. Fecha y Reloj. La fecha y hora actuales se muestran en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

B2.9. Indicador Espacio de almacenamiento. El estado actual de la capacidad de almacenamiento disponible, con la posibilidad de ver el número aproximado de imágenes de “Adquirir” que se pueden almacenar.

NOTA La aplicación de software del Histolog[®] Scanner proporciona a los usuarios Fecha y Reloj **[B2.8]**, así como un indicador Espacio de almacenamiento **[B2.9]** en los tres modos de pantalla: en la pantalla Galería, en la pantalla Modo en vivo y en la pantalla Examinador de imágenes.



B2.10. Logotipo del Histolog[®] Scanner. Tocando el logotipo del Histolog[®] Scanner se activa el cuadro de diálogo de servicio técnico del Histolog[®] Scanner. Este cuadro de diálogo permite a los usuarios exportar información técnica sobre el Histolog[®] Scanner (botón Registros) a un dispositivo de almacenamiento local (un medio de almacenamiento USB o una unidad compartida conectada a red) o al servidor específico de SamanTree Medical (si el dispositivo está conectado a Internet), para ejecutar una prueba del sistema que incluya una prueba de conexión al servidor proxy para la colaboración remota (botón Prueba) y para controlar la funcionalidad de colaboración remota (botón Remoto, consulte más detalles en el apartado [6](#)).




NOTA El mapa de ubicación de la muestra aparecerá automáticamente durante la adquisición de una imagen en sesiones de perfiles de aplicación Mama y Skin si no se ha introducido previamente la ubicación de una muestra.

B2.14.3 Ubicación del tumor está disponible en sesiones de perfil de aplicación Próstata. Sirve para documentar gráficamente la ubicación de tumores en la muestra prostática resecada. Los datos de ubicación de tumores están vacíos al comienzo de una sesión y pueden editarse en caso necesario para añadir, cambiar posiciones o eliminar ubicaciones de tumores de la muestra prostática sometida a obtención de imágenes en esta sesión.

Tocando el botón B2.14.3 se activa el control gráfico del mapa de ubicación de tumores, que presenta el mapa de ubicaciones y varios botones de control para trabajar con las ubicaciones en el mapa.


B2.15. Descripción de la sesión sirve para especificar la descripción textual de la sesión. La descripción de la sesión está vacía al comienzo de una sesión, y puede editarse en todo momento si es necesario. Para editarla con un teclado virtual, basta con tocar el botón.

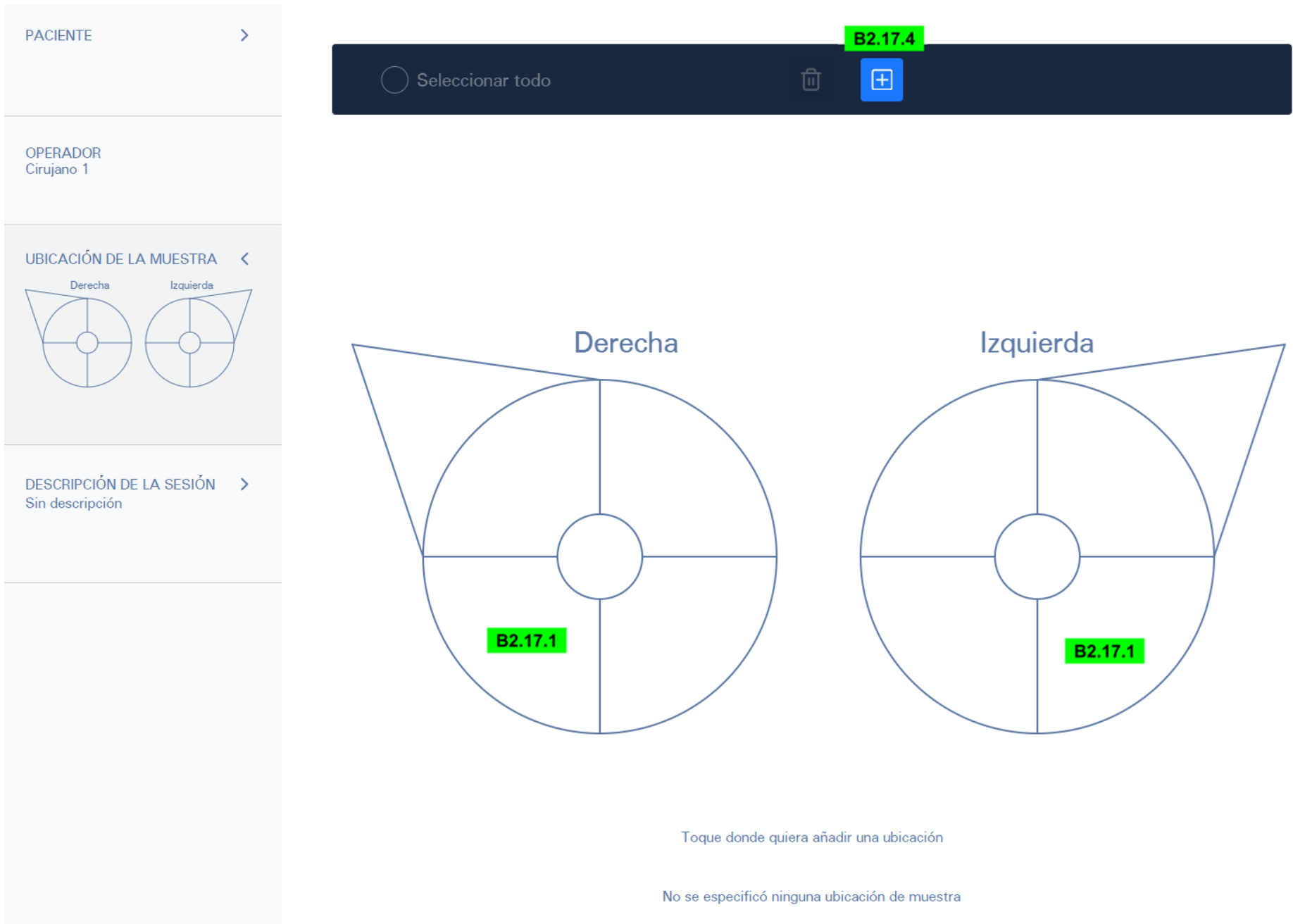

B2.17.1. El mapa de ubicación de la muestra del perfil de aplicación Mama es una representación esquemática de la mama Derecha y Izquierda de la paciente, en el que se pueden añadir, mover o eliminar las ubicaciones de la muestra.

PACIENTE >

OPERADOR
Cirujano 1

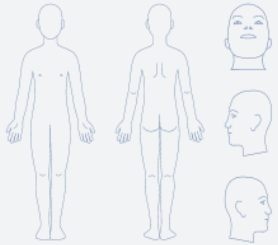UBICACIÓN DE LA MUESTRA <


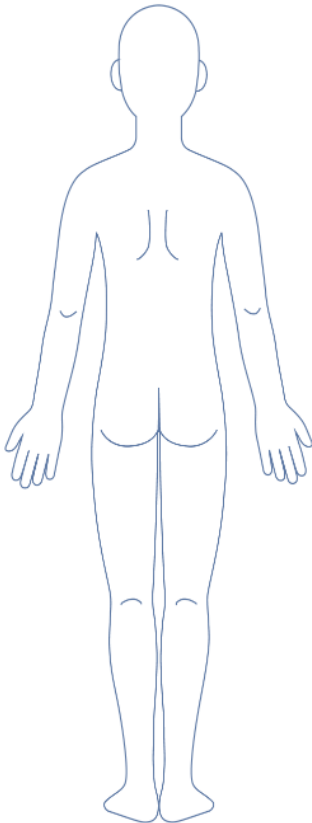
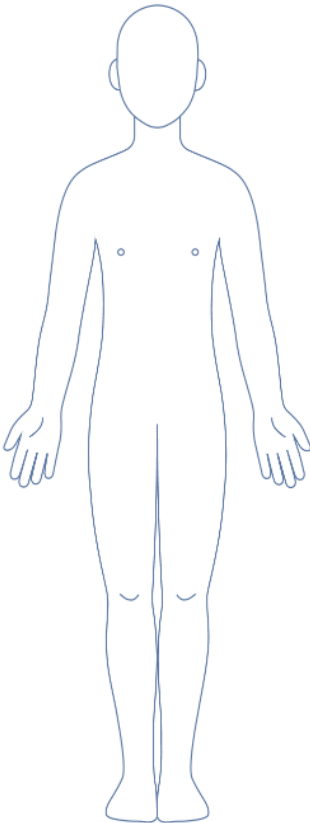
DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN >
Sin descripción

B2.17.4

Seleccionar todo








B2.17.2

Toque donde quiera añadir una ubicación


No se especificó ninguna ubicación de muestra

B2.17.2. El mapa de ubicación de la muestra del perfil de aplicación Piel es una representación esquemática de los lados delantero y trasero del cuerpo del paciente, y de los lados delantero, izquierdo y derecho de la cabeza del paciente, en la que se pueden añadir, mover o eliminar ubicaciones de muestras.

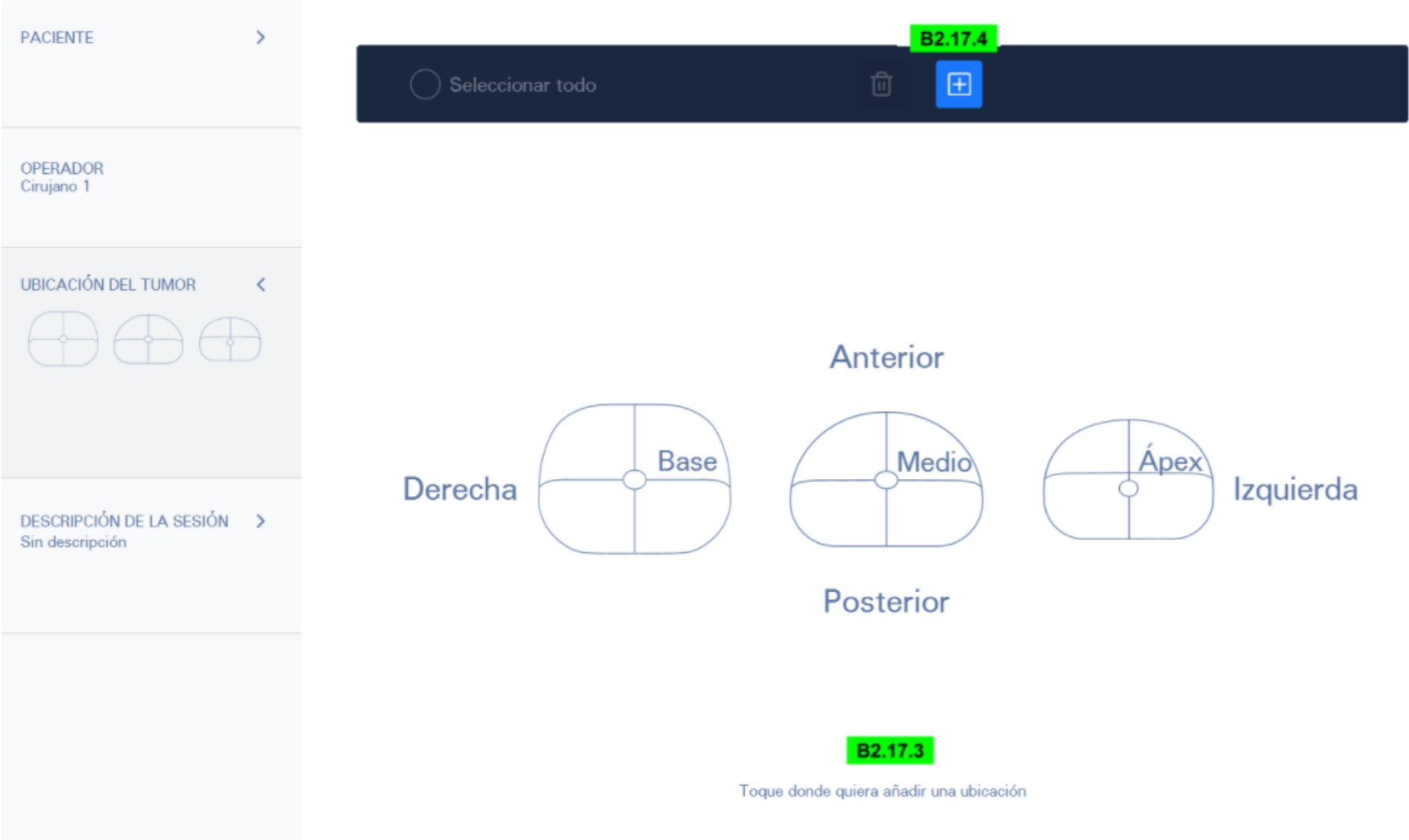

B2.17.3. El mapa de ubicación de tumores del perfil de la aplicación Próstata es una representación esquemática de las partes Base, Media y Ápice de la próstata del paciente, en la que se pueden añadir, mover o eliminar localizaciones de tumores.

B2.17.4. Botón Añadir ubicación. Si el botón está activo (en color azul), toque la ubicación del mapa (B2.17.1, B2.17.2 o B2.17.3) para indicar la ubicación de la muestra en el paciente o la ubicación del tumor en la próstata del paciente. La posición de la ubicación se puede cambiar posteriormente. Utilice un toque prolongado para arrastrar y mover la ubicación con un dedo. Se pueden ubicar hasta 5 ubicaciones en el mapa. En sesiones de perfiles de aplicación Mama y Piel, las imágenes adquiridas en el futuro se atribuirán de forma predeterminada a la última ubicación de muestra introducida. En las sesiones de perfil de aplicación Próstata no hay ninguna ubicación de tumor predeterminada asignada a las imágenes.

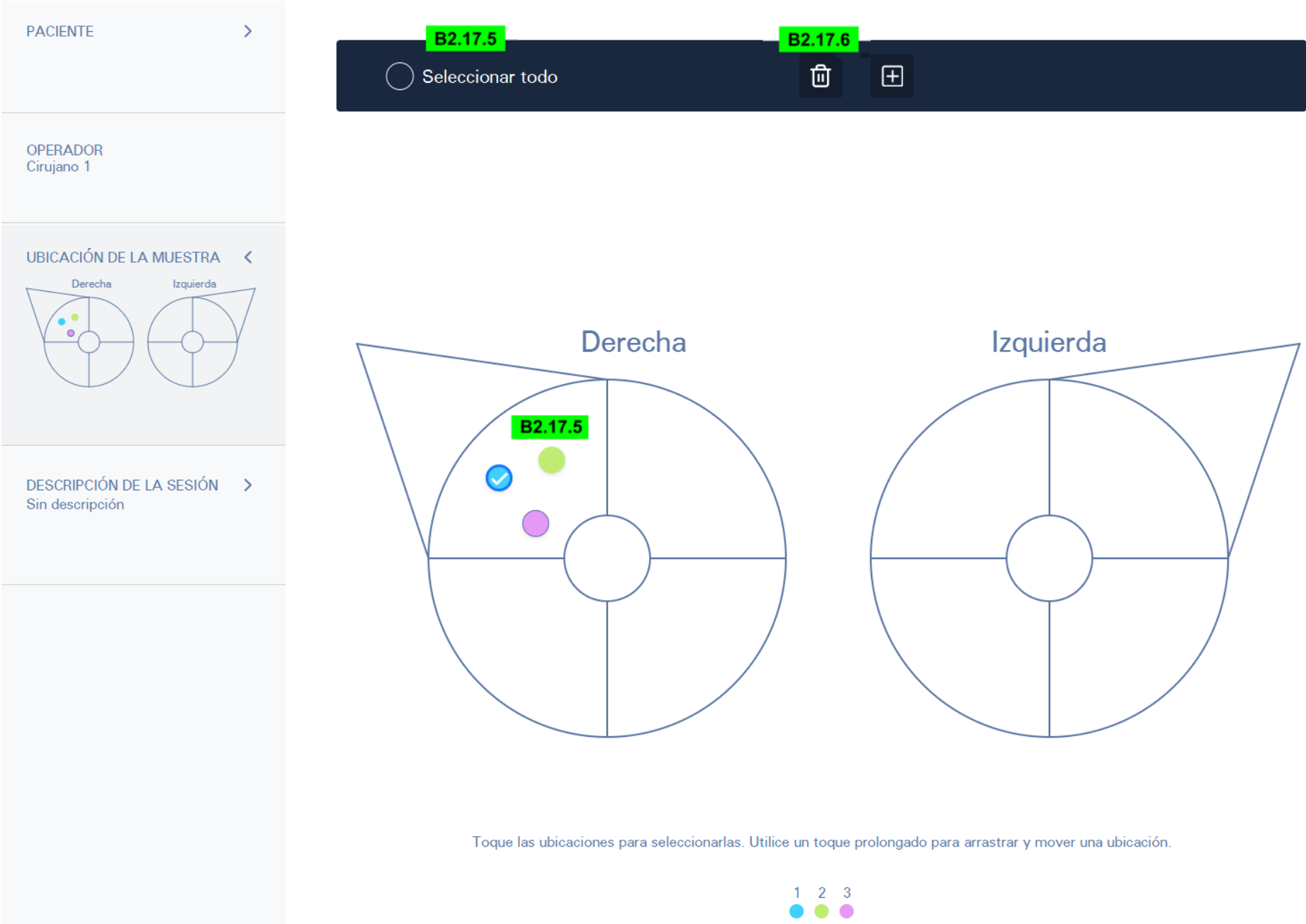

B2.17.5. Selección de la ubicación. Es necesario seleccionar una ubicación existente antes de eliminarla. Las herramientas de selección constan de un botón “Seleccionar todo” y marcas de verificación en las etiquetas de las ubicaciones. Tocando una etiqueta de ubicación concreta se colocará una marca de verificación sobre la misma y, de este modo, quedará seleccionada para poder eliminarla. Tocando en el botón “Seleccionar todo” se seleccionarán todas las etiquetas de las ubicaciones para poder eliminarlas.

B2.17.6. Botón Eliminar ubicación. Las ubicaciones que se seleccionen en el mapa (con las marcas de verificación mostradas sobre sus etiquetas coloreadas) se pueden eliminar usando el botón “Eliminar ubicación”.

NOTA Tocando los botones B2.12-B2.15 se activan los controles correspondientes de entrada de datos. Si se tocan otra vez los botones, se desactivan los controles de entrada de datos. Para los controles de datos con texto, se activará/desactivará automáticamente un teclado virtual en la pantalla.



B2.16.4. Botón Exportar. El botón se activa en cuanto se seleccionan algunas imágenes de la sesión con las herramientas de selección (B2.16.2). Tocando el botón aparecerán las opciones disponibles para los tipos de exportación, que son:

- Exportar a formato de imagen;
- Exportar a formato Histolog;
- Exportar a informe[s] PDF.


Exportar a formato de imagen: Este modo de exportación permite exportar a una unidad USB, o a una unidad compartida conectada a red, las imágenes seleccionadas como archivos que pueden visualizarse mediante un visor estándar de terceros. Los datos contextuales de la sesión, los datos de las imágenes, el ajuste de contraste de las imágenes y las anotaciones de las imágenes no están disponibles en este modo de exportación.

Exportar a formato Histolog: Este modo de exportación permite exportar a una unidad USB, o a una unidad compartida conectada a red, las imágenes seleccionadas junto con sus metadatos (incluidos los datos contextuales de la sesión, los datos de las imágenes y las anotaciones de las imágenes) para visualizarlas posteriormente con la aplicación de software del Histolog[®] Viewer.


Exportar a informe[s] PDF: Este modo de exportación permite exportar a una unidad USB, o a una unidad compartida conectada a red, un informe en PDF con todas las imágenes seleccionadas y sus datos asociados.

La opción **Anonimizar** está disponible cuando es necesario eliminar de la exportación los metadatos de las imágenes seleccionadas: el nombre del paciente se sustituye por un código aleatorio y se eliminan todos los demás datos del paciente, los datos del operador y la descripción de la sesión.

Los usuarios pueden tocar en su opción de exportación preferida para comenzar el procedimiento de exportación correspondiente.

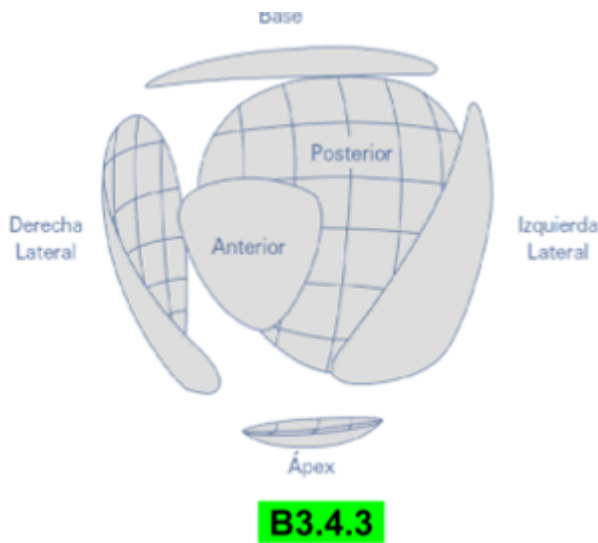

B3.4.4. Superficie de la muestra para perfil de aplicación Otro. Seleccione la superficie de la muestra que se obtuvo en el microscopio. Para documentar las superficies intermedias, seleccione dos superficies adyacentes en el control gráfico.

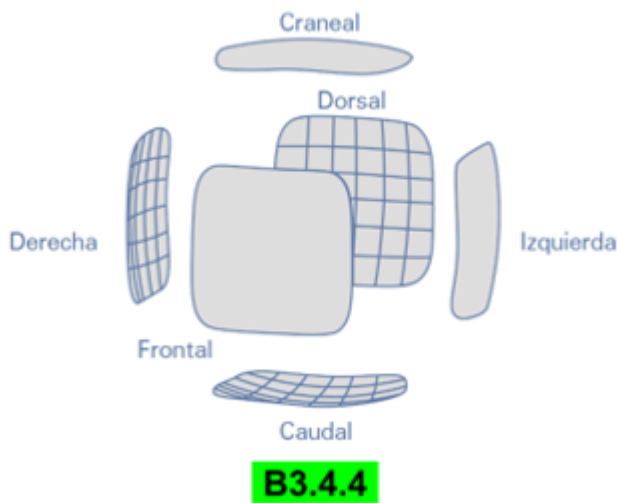

B3.5. Regresar a la pantalla Galería. Con este botón se sale de la pantalla Examinador de imágenes y se regresa a la pantalla Galería.

B3.6. Botón Eliminar. Con este botón se elimina la imagen mostrada, moviéndola al conjunto de Elementos eliminados.

B3.7. Botón Exportar. Este botón exporta la imagen mostrada a una unidad USB o a una unidad compartida conectada a red. Tiene la misma funcionalidad que la descrita anteriormente para B2.16.4.

5.3.6.2. Área de la imagen con mapa

El área de la imagen con mapa contiene:

4. Aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla un mensaje temporal de confirmación. El mensaje desaparecerá pasados unos segundos.



